

Modulo de entrenamiento en el uso de la RPR

Objetivos	Contenido	Metodología	Tiempo	Materiales	Observaciones
Que los participantes conozcan el objetivo y contenidos e la sesión	Bienvenida Asistencia	Expositiva	10 minutos	Lista de Asistencia	Ver la guía de capacitador
Determinar que puntos del proceso de RPR necesitan refuerzo Con una muestra positiva baja (título 1:2) determinar si es que la lectura del RPR cuantitativo del evaluado concuerda en un 100% con la lectura del evaluador.	Evaluación de entrada	Practica evaluada	30 minutos	Check list de procedimientos Formato de resultados	Ver: SOP-LabP002-RPR
Que los participantes conozcan el principio teórico de la prueba de RPR	Capacitación teórica	Expositiva	30 minutos	Copia de la guía de practica	Ver la guía de practica
Que los participantes conozcan la técnica usada para la prueba de RPR	Capacitación practica	Practica demostrativa	40 minutos	Ayudas visuales y reporte de resultados	Ver la guía de practica
Que los participantes se familiaricen con la técnica y absuelvan dudas y dificultades encontradas	Practica	Practica	40 minutos (para grupo de 5 a 7 participantes)	Sueros previamente analizados Kit de RPR Reloj	Ver la guía de practica
Determinar si es que después de la capacitación, la lectura del RPR cuantitativo del evaluado concuerda en un 100% con la lectura del evaluador.	Evaluación de salida	Practica evaluada	30 minutos	Check list de procedimientos Formato de resultados	Ver: SOP-LabP002-RPR
Que los participantes reciban sus resultados y absuelvan dudas y dificultades encontradas	Retroalimentación	Expositiva	20 minutos	Expositiva	-

Modulo de entrenamiento en el uso de la Prueba Rápida de Sífilis

Objetivos	Contenido	Metodología	Tiempo	Materiales
Que los participantes conozcan el objetivo y contenidos e la sesión	Bienvenida Asistencia	Expositiva	10 minutos	Lista de Asistencia
Revisión de las practicas mínimas de bioseguridad	Bioseguridad	Expositiva	5 minutos	Guantes, bolsa de bioseguridad
Que el participante sepa que es, por qué es importante y como funciona una prueba rápida de sífilis	Introducción de la prueba rápida de sífilis	Expositiva	10 minutos	Prueba rápida de sífilis
Que el participante se familiarice con el material necesario (capilares, lancetas, alcohol swab) y el kit de PRS (prueba rápida y buffer)	Materiales necesarios para usar una prueba rápida	Demostrativa	5 minutos	Pruebas rápidas, buffer, capilares, lancetas, alcohol swab
Que el participante se familiarice con el uso de la lanceta, la técnica de pulpejo de dedo, uso del capilar	De muestra de sangre de pulpejo de dedo	Demostrativa	5 minutos	Capilares, un voluntario para la demostración
Que el participante se familiarice con la aplicación de la muestra de sangre en la PRS, el volumen del buffer a usar y el tiempo de espera para la lectura.	Uso del casete de prueba rápida	Demostrativa	5 minutos	Prueba rápida de sífilis , buffer, reloj, capilares, muestras positiva
Que el participante se familiarice con los posibles resultados, casos de invalidación de la PRS	Lectura y reporte de la prueba rápida	Demostrativa	10 minutos	Prueba rápida con resultados negativo y positivo
Que los participantes realicen todo el proceso de la prueba rápida entre ellos (como voluntarios) y que encuentren y absuelvan sus dudas y dificultades encontradas	Diagnostico usando la prueba rápida	Practica dirigida	40 minutos	Prueba rápida de sífilis , buffer, reloj, capilares